

## **SPØRGSMÅL:**

**Hvordan behandler jeg mine SoftTouch pakninger bedst muligt?**

## **SVAR:**

For den bedste kulde effekt, placer pakningen plant i plastpose, i fryser for min. 1-2 timer før brug.

For den bedste varme effekt, placer pakningen plant i mikroovn i 1 minut ved max. styrke. Følgende anvendes der intervaller af 10 sekunders varighed indtil den ønskede varme opnås. Såfremt der anvendes en allerede varmet pakning, placeres pakningen plant i mikroovn i 30 sekunder ved max. styrke og efterfølgende intervaller af 10 sekunders varighed indtil den ønskede varme effekt er opnået.

Mikroovne kan være meget forskellige, så vær forsigtig ved opvarmning og håndtering af pakningen lige efter opvarmning.

Overophedning af pakning vil bevirke lækning, så opvarm aldrig i mikroovn i mere end 2 minutter ad gangen.

Vask pakning i mild sæbevand og skyl efter.