

**SPØRGSMÅL:**

**Hvordan behandler jeg mine flergangselektroder bedst muligt?**

**SVAR:**

Flergangselektroderne er pålagt en gel der holder til ca. 20-25 behandlinger, så er gelen opbrugt og elektroden skal bort kastes.

Inden brug bør huden afsprittes, og kraftig hårvækst fjernes. Efter brug fjernes elektroden forsigtig – uden at trække ledningen, som kan ødelægge den. Man tager i et af hjørnerne og trækker den af huden.

Inden opbevaring i posen fugtes gelen for at forlænge levetiden.

Lad ikke elektroder ligge opbevaret i solen, på rullebordet eller vindues karmen. Hvis de tørre og ruller sammen skal de bort kastes.

